



Colon Transit tid:

Sammensætning

6 gelatine kapsler med hver 10 røntgen markører af Polyuretan indeholdende 40 % Barium Sulfat (USP)

Kapslerne er nummereret og består følgende former:

Kapsel Nr.

Kapsel 1
Kapsel 2
Kapsel 3
Kapsel 4
Kapsel 5
Kapsel 6

Kapselindhold:

10 stave
10 kugler
10 store ringe
10 terninger
10 små ringe
10 stave

Beskrivelse:

Denne test er et diagnostisk hjælpemiddel, som er blevet udviklet med henblik på at undersøge passagen af indholdet i tyktarmen og rytme afskaffelse. Det består af 6 kapsler, der skal sluges i den nummererede rækkefølge og på det angivne tidspunkt. Hver kapsel indeholder 10 radio-uigennemsigtige markører, som ikke undergår nogen ændringer i mave-tarmkanalen. Uden nogen særlig forberedelse af patienten kun ved hjælp af et enkelt røntgen billede efter 7 dage er det mulig at rekonstruere aktivitet i tyktarmen i løbet af denne periode. Beregningen foretages i henhold til Metcalf (Gastroenterologi 1987, 92 40-47) og Chaussade (Gastroneteról. Clin. Biol. 1986, 10: 385-389).

Indtagelse:

Dag 1-6: 1 kapsel kl. 9.00 i forbindelse med morgenmad
Dag 7: Udførelse af røntgenbillede kl. 9.00