

Fjernelse af fremmedlegemer

- nemt og sikkert med Clearway Suction

Sådan bruges Clearway Suction

1. Tag Clearway ud af pakken, tilslut til det eksisterende vakuum system ved brug af standard sugeslange
2. Manøvrer Clearway sugekoppen omkring til den kommer i kontakt med det pågældende objekt. Når sugekoppen er i kontakt med objektet placeres tommelfingeren på Clearway Suction kontrolknappen for at begynde sugning. Ideelt sug ved 200-300 psi.
3. Træk forsigtigt Clearway ud mens tommelfingeren fortsat holdes på kontrolknappen, og fjern objektet.
4. Det brugte Clearway sugehåndtag kasseres efter brug.

- Fjerner besværlige fremmedlegemer i øre og næse
- Påsættes standard sugesystem og slange
- Ideel til skadestuen / ENT / ØHN
- Mindre traumatisk for patient og familie
- Kan fjerne behovet for ENT kirurgi eller indlæggelsestid

Clearway varenr. MSVT1001-S

Pris pr. remover kun kr. 146,- ekskl. moms

Min. bestilling 10 stk. = 1 æske

