





MEDICOLINE

## PRONTO DRY test


1. Åben test

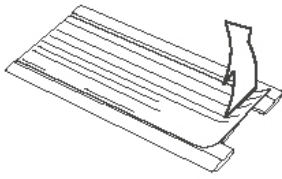


2. Placer biopsi i testbrønd

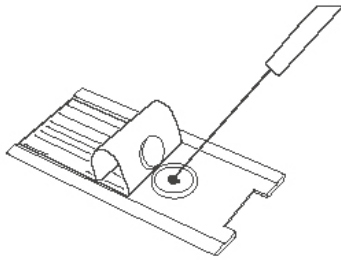


3. Luk test

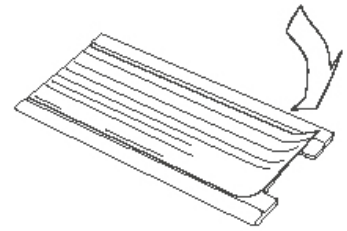

4. Pres med tommelfinger

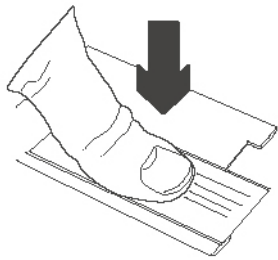


5. Vent 1 time

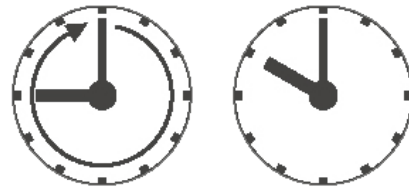


6. Testresultat

Rød = Positiv

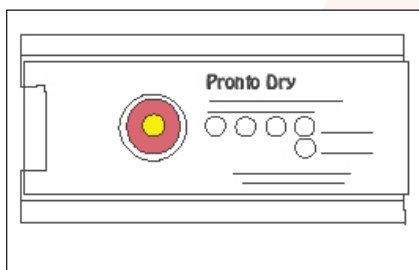

Gul = Negativ

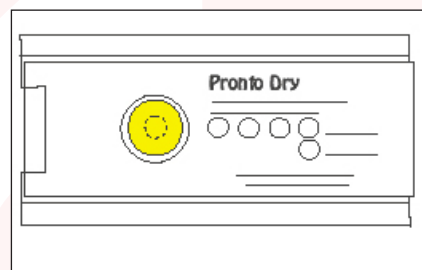

**ADVARSEL:** Potentiel smittefarligt materiale.  
Håndter alle biopsi prøver som smittefarlige

Læs mere på [www.medicoline.dk](http://www.medicoline.dk)

Medicoline ApS  
Værkstedsvvej 24 B  
DK-4600 Køge  
Tlf: 36 16 64 88  
Fax: 36 16 67 91  
[salg@medicoline.dk](mailto:salg@medicoline.dk)