

## Sådan vedligeholder du Thermofocus 0800H5

### RENGØRING

#### RENGØRING AF DEN GYLDNE REFLEKTOR

Det er vigtigt, at den gyldne reflektor aldrig berøres med fingre eller nogen genstand, fordi den er særdeles fintfølede.

Derfor anbefaler vi, at du altid beskytter termometeret, ved at lukke beskyttelsesdækslet, når det ikke er i brug. Hvis reflektoren behøver rengøring, fugt en bomuldsvatpind lidt med husholdningssprit og påfør forsigtigt på reflektoren uden at trykke. Pas på, at du rengør væk fra sensorretningen, som er placeret i bunden af reflektoren.

Undgå rengøring med andre genstande eller væsker, som kan ridse eller på anden måde skade reflektoren. Mens du rengør, vær opmærksom på at ingen væske trænger igennem mellem reflektoren og sensoren.

#### RENGØRING AF TERMOMETERETS HOVEDDEL

Brug en blød og let fugtig klud med sæbevand.

**BRUG IKKE termometeret før mindst 30 minutter efter rengøring.**

