

Tillægsbeskrivelse vedr. kalibrering af ThermoFocus 0800H5

For at undgå forvirring om kalibrering af Thermofocus 0800H5, se venligst nedenfor:

Formålet med målskiven er at sygeplejersken altid skal foretage MQCS proceduren på samme sted. Målskiven bør fastsættes på en indervæg hvor temperaturen er stabil og bør herefter ikke fjernes. Derudover må der ikke være nogen luftbevægelse omkring selve målskiven. Hvis ThermoFocus 0800H5 skal benyttes i andre rum, bør der indkøbes ekstra målskiver, en til hvert rum. Selve målskiven er ikke en nødvendighed, en markering på væggen er også ok, hvis bare væggen har samme temperatur som selve rummet. (Derfor altid in indervæg) Målskiven er dog mere tilbøjelig til at blive påvirket af lufttemperaturen i rummet end en solid mur/væg og kan give et mere præcist resultat.

Hvis ThermoFocus 0800H5 skal bruges inde i en kuvøse, skal målskiven IKKE benyttes. Temperaturen i en kuvøse er ensartet og MQCS bør ske på en væg inde i selve kuvøsen. Start MQCS proceduren udenfor kuvøsen og indenfor 10 sekunder peg med ThermoFocus 0800H5 mod en væg inden i kuvøsen, uden objekt mellem væg og termometret og afslut MQCS proceduren. Efter denne procedure kan temperaturen på barnet måles. Hvis termometret fjernes fra kuvøsen skal MQCS proceduren gentages.